



WOLASAN F80 und F80pur

Für die rückstandsfreie Flächendesinfektion geeignet.
Auch parfümfrei (H80pur) erhältlich.

ANWENDUNGSGEBIETE

WOLASAN F80 ist für die rückstandsfreie Schnelldesinfektion von Flächen und Medizinprodukten von berufsmäßigen und privaten Verwendern geeignet.

Empfohlen für alle hygiene-relevanten Bereiche, z. B. Gesundheitswesen und Industrie (Lebensmittelverarbeitung, Medizinprodukte- und Futtermittelherstellung usw.).

Hinweis: Nicht für die Sterilisation von medizinischen Instrumenten geeignet.

VERWENDUNG

Stark verschmutzte Oberflächen müssen vor der Behandlung mit WOLASAN F80 gereinigt werden. WOLASAN F80 wird anschließend auf der zu desinfizierenden Oberfläche verteilt, so dass die gesamte Fläche für mindestens 30 Sekunden vollständig benetzt ist.

MERKMALE

- Schnelldesinfektion
- gebrauchsfertige Lösung



WIRKUNG UND EIGENSCHAFTEN

- levurozid
- bakterizid
- begrenzt viruzid
- rückstandsfreie Auftrocknung
- schnelle Einwirk- und Abtrocknungszeit
- frei von Allergenen
- schonender bei Kunststoffuntergründen
- hautfreundlich
- mit Zitronenduft
- auch parfümfrei erhältlich (H80pur)

INHALTSSTOFFE

Wirkstoff: 80 % (v/v) Ethanol
Weitere Bestandteile: Wasserstoffperoxid,
Duftstoffe*, E131, Wasser

*WOLASAN F80

ZULASSUNGEN

Bundesanstalt für Arbeitsschutz und
Arbeitsmedizin (BAuA)
WOLASAN F80: Reg. Nr. N-97091 (PT 1, PT 2, PT 4)
WOLASAN F80pur: Reg. Nr. N-97380 (PT 1, PT 2, PT 4)

LIEFERFORM

1 l, 5 l Kunststoffkanister

ENTSORGUNG

Abfallschlüsselnummer 180107

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Systembasis	Bio-Ethanol
Dichte (bei 20 °C)	0,84 g/cm ³

HALTBARKEIT

Chemische Beständigkeit mind. 24 Monate im
geschlossenen Gebinde haltbar.

Verwendbar bis mind. 6 Monate nach Öffnung
des Gebindes haltbar.

GEFAHRENHINWEISE

- H225: Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H319: Verursacht schwere Augenreizung.

ALLGEMEINE HINWEISE

Alle hier angegebenen Daten dienen lediglich der
Beschreibung des Produkts und beruhen auf Tests
und den aus der praktischen Verwendung erzielten
Ergebnissen. Für ihre Genauigkeit oder Vollständigkeit
kann daher keine Gewähr übernommen werden.
Beratungen erfolgen nach bestem Wissen. Alle
Daten unterliegen eventuellen Änderungen ohne
Vorankündigung.

Das Datenblatt verliert spätestens 5 Jahre (31.12.2026)
nach Erscheinen seine Gültigkeit, sofern es keine
Änderungen durch die WOLA GmbH gibt. Die Angaben
und Empfehlungen aus dieser Produktinformation
entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse
und dienen zur Information des Käufers. Sie entbinden
den Käufer nicht, die Produkte auf ihre Eignung und
Verwendung zu prüfen. Eine einwandfreie Qualität
gewährleisten wir im Rahmen unserer Liefer- und
Zahlungsbedingungen.

SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

Alle Sicherheitsvorschriften auf den Gebinden,
den Technischen Produktinformationen und den
Sicherheitsdatenblättern sowie einschlägige örtliche,
nationale und EU Vorschriften sind zu beachten. Auf
persönlichen Arbeitsschutz muss geachtet werden.